



WISEIRA PROTECT

Viseira de Proteção contra projeção de partículas

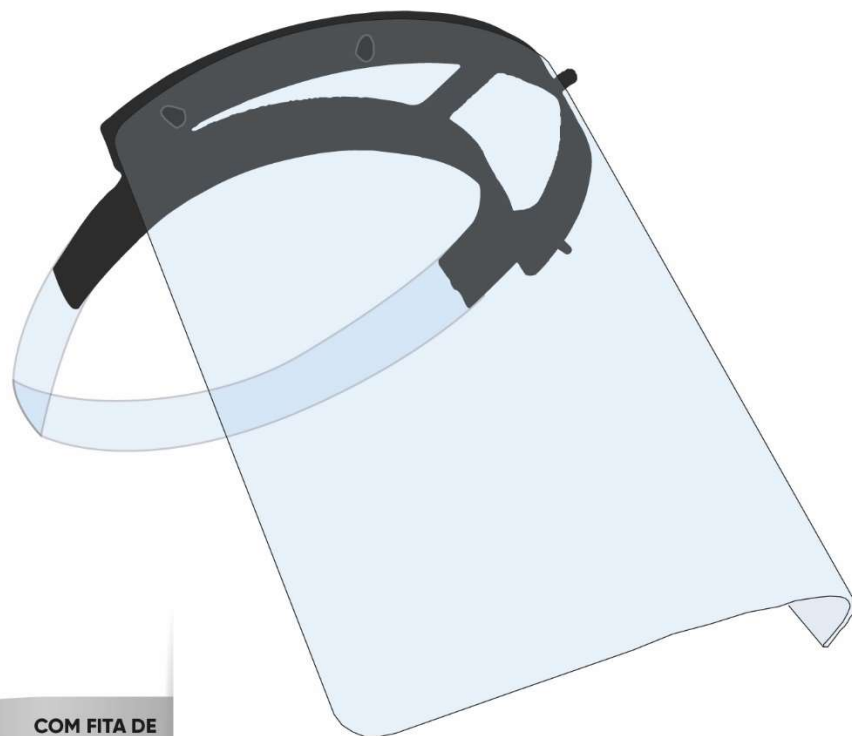

COM FITA DE
PROTEÇÃO PARA
MÁXIMO CONFORTO

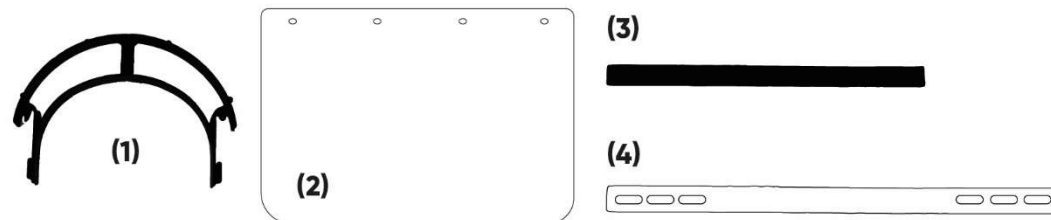

I.
Retire do saco: o suporte **(1)**, a viseira **(2)**, a fita de espuma anti-transpiração **(3)** e a fita de cabeça regulável **(4)**.



II.
Cole no suporte **(1)** a fita de espuma anti-transpiração **(3)** a toda a volta. Vá descolando a proteção amarela à medida que vai colando a fita.



III.
Retire o plástico da viseira, apenas em um lado. Quando for posteriormente encaixar a viseira **(2)** no suporte **(1)**, este lado deverá ficar para o interior. Se ficar alguns resíduos do plástico, estes saem após a lavagem e desinfecção da viseira.



IV.
Encaixe a viseira **(2)** inserindo cada uma das furações existentes, nas saliências do suporte **(1)**. O suporte deverá ter os pins de encaixe em baixo (fotografia de rosto). Terá que exercer alguma força no encaixe.



V.
Encaixe a fita de cabeça regulável **(4)** num lado. Na outro, encaixe a furação que melhor se ajuste à medida da sua cabeça. Escolha uma das 3 posições disponível em cada lado da fita.



VI.
Depois de ajustada, retire o plástico frontal da viseira.

VII.
Antes de utilizar deve ser desinfetada e lavada com água e sabão, DESINFECT-ALL KOBY ou outro produto semelhante.

Este EPI não está certificado para uso médico, a utilização é à responsabilidade do utilizador. De acordo com as indicações da DGS e de forma a assegurar os equipamentos médicos eficazes na prevenção e combate do novo coronavírus, foi estabelecido um regime excecional, através da publicação da Recomendação (UE) 2020/403 da Comissão de 13 março, à obrigatoriedade da aposição da marcação CE, no que respeita à importação dos produtos necessários à proteção dos profissionais de saúde envolvidos no combate à doença COVID-19.

Garantimos a rastreabilidade de todos os produtos utilizados no fabrico da viseira.